



Test de grossesse Haute Sensibilité Midstream

Instructions



Veillez lire attentivement les instructions avant d'effectuer le test.

1. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
2. A conserver dans un endroit sec (4-30°C). Avant d'être ouvert, le test doit être à température ambiante.
3. Ne pas conserver au réfrigérateur.
4. Tenir hors de la portée des enfants.
5. Réservé à un usage *in vitro*. Ne pas utiliser de façon interne.
6. Ne pas ouvrir l'emballage tant qu'il n'est pas à température ambiante et que vous n'êtes pas prête à effectuer le test.

Comment utiliser ce test ?


1. Retirer le test de son emballage en aluminium
2. Retirer le capuchon (Cap)
3. Tenir le test à son extrémité (Thumb Grip) en exposant la bande réactive (Absorbent Tip) directement dans le jet d'urine pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'elle soit imbibée.
4. **Attention: ne pas uriner sur la fenêtre de test (Test) et de contrôle (Control).** Vous pouvez également uriner dans un récipient propre et sec puis y plonger la bande réactive pendant au moins 10 secondes.
5. Après avoir retiré le test du jet d'urine, replacer immédiatement le capuchon (Cap) sur la bande réactive (Absorbent Tip), poser le test sur une surface plane avec la fenêtre de test (Test) et de contrôle (Control) orientée vers le haut.
6. Vous devez constater l'apparition d'une ligne rosée autour de la fenêtre de test et de contrôle (Test) (Control). Attendre au moins 3 minutes jusqu'à ce que les lignes rouges apparaissent. Si aucune ligne rouge n'apparaît, attendre une minute de plus. Certains résultats positifs peuvent être constatés en une minute ou moins en fonction de la concentration en HCG.
7. Ne pas lire les résultats au-delà de 10 minutes.

Comment interpréter les résultats ?




PREGNANT

The presence of two red lines, one line in the test window (T) and one line in the control window (C), means you are probably pregnant. One line may be lighter than the other, they do not have to match.

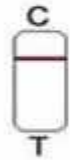

NOT PREGNANT

The presence of one red line in the control window (C) means you are probably not pregnant.

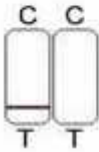

INVALID RESULT

The result is invalid if no red line appears in the control window (C), even if a line appears in the test window (T). You should repeat the test with a new midstream test.

PREGNANT : la présence de 2 lignes rouges, l'une dans la fenêtre de test (T), l'autre dans la fenêtre de contrôle (C), indique que vous êtes probablement enceinte. L'une des lignes peut être plus claire que l'autre, elles ne sont pas forcément identiques.

NOT PREGNANT : la présence d'une seule ligne dans la fenêtre de contrôle signifie que vous n'êtes probablement pas enceinte.

INVALID RESULT : le résultat est non valide si aucune ligne n'apparaît dans la fenêtre de contrôle (C), et cela même si une ligne apparaît dans la fenêtre de test (T). Il convient alors de refaire un nouveau test.

Attention

Il est recommandé de ne pas boire juste avant d'effectuer ce test. En effet, l'eau peut provoquer une dilution de l'hormone HCG et la rendre ainsi plus difficilement détectable. Boire de l'alcool durant la grossesse est dangereux pour le bébé.