



TESTS DE DEPISTAGE QUALITATIF

Kit de dépistage Multi - Drogues



MedicaTest.com – Tous droits réservés

Dernière révision de la notice : mars 2007

FRANCAIS

Abréviations :

Amphétamines (AMP, speed), Benzodiazépines (BZD, valium), Cocaïne (COC), Marijuana (THC, cannabis), Méthamphétamines (MET, ecstasy), Méthadone, Opiacés (OPI, Héroïne).

Quand effectuer ce test ?

Ce test peut être effectué à tout moment. Il permet de dépister de façon qualitative dans un échantillon d'urine ou dans une boisson la présence de plusieurs drogues. C'est le test idéal pour tout parent souhaitant effacer tout soupçon quant à la consommation d'une drogue quelconque par son enfant.

ATTENTION, CE TEST EST INDICATIF, IL NE DONNE PAS UNE MESURE PRECISE DE LA QUANTITE DE STUPEFIANTS PRESENTE DANS LES URINES.

Comment utiliser ce test ?

1. Retirer délicatement le test de son emballage (n'ouvrir l'emballage de protection qu'au moment d'utiliser le test).
2. Se procurer dans un gobelet, un échantillon d'urine à tester.
3. Retirer le capuchon de protection sur le vas du test de façon à découvrir les bandes de test absorbantes. Ne pas toucher les bandes de test et ne pas jeter le capuchon de protection.
4. Plonger délicatement les bandes de test dans l'échantillon d'urine, s'assurer que la partie plastique du test ne soit pas en contact avec l'urine. Laisser les bandes de test en contact avec l'urine pendant 10 à 20 secondes. Dans ce laps de temps, l'échantillon devrait commencer à imbiber les bandes de test par capillarité.
5. Après 20 secondes, retirer les bandes de test de l'échantillon et remettre le capuchon de protection en place.
6. Poser le test sur une surface plane et propre pendant qu'il se développe.
7. Un résultat négatif peut être lu dès son apparition mais un résultat positif ne peut être lu qu'au moins 5 minutes après que le test ait été retiré de l'échantillon. D'une façon générale, tous les résultats ne devraient pas être lus après un délai de 10 minutes afin de limiter le risque de fausses interprétations.


Résultats

Chaque bande de test correspond à une famille de drogues ce qui signifie que chacune des bandes de test doit être lue individuellement.

Deux lettres figurent sur le boîtier du test à côté des bandes de test, 'C' correspond à la bande témoin et 'T' correspond au résultat du test effectué.

Une ligne rose doit apparaître sur la bande témoin (C) pour chacune des bandes de test, cette présence confirme que le test fonctionne correctement. Si aucune ligne n'apparaît au niveau de la lettre (C), le test n'a pas fonctionné correctement et il est nécessaire d'en utiliser un nouveau.

Une seconde ligne rose, peu importe qu'elle soit pâle ou non, doit apparaître en face de la lettre (T), cela correspond à un résultat négatif. Si aucune ligne n'apparaît en face de la lettre (T) alors la personne testée est diagnostiquée positive à la consommation de la drogue correspondante.

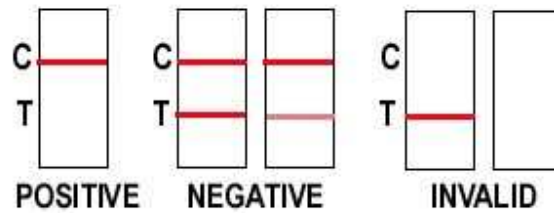

Le code couleur ou l'abréviation de chaque bande de test permet d'identifier quelle famille de drogue est associée à chacune des bandelettes.

Pour une bande de test donnée :

Un résultat négatif correspond à l'apparition de 2 lignes (une face à la lettre (C), l'autre face à la lettre (T)) et un résultat positif correspond à l'apparition d'une seule ligne face à la lettre (C).

Que dois-je faire avec ces résultats ?

Un résultat négatif indique que la personne testée ne présente soit aucune trace, soit une quantité inférieure au seuil de détection du test, de l'une des drogues testées dans le corps au moment du dépistage. Il est possible d'effectuer un nouveau test environ un mois après.

En cas de résultat positif, cela signifie que des traces de drogues ont été détectées dans l'urine. Il est possible d'effectuer un nouveau test ultérieurement pour confirmer le résultat ou d'orienter la personne testée vers un laboratoire d'analyse pour un dépistage plus complet et quantitatif au moyen de méthodes spectrométriques et chromatographiques par exemple.

ATTENTION :

De nombreux médicaments, dont certains peuvent être achetés sans ordonnance, contiennent des dérivés opiacés, c'est-à-dire des substances chimiquement semblables à l'héroïne. C'est le cas de certains sirops contre la toux et de nombreux médicaments contre la douleur dont la consommation peut provoquer un résultat positif à un test de dépistage.

La loi interdit de procéder à un quelconque examen médical à l'insu des personnes, elle interdit également de dépister un mineur à l'insu de ses parents.