



Test de fertilité féminine (FSH) 40 MUI

Format Bandelette

A qui s'adresse ce test ?

L'hormone F.S.H. est présente en plus grande quantité chez les femmes dont les cycles sont irréguliers et elle augmente dans l'organisme lorsque les femmes vieillissent. Lorsque la ménopause est proche, le taux de cette hormone est particulièrement élevé et agit comme un système d'alarme. Ainsi un résultat négatif à ce test est une bonne nouvelle même s'il n'est pas une preuve formelle de fertilité. Un résultat positif signifie une fertilité réduite et il est alors recommandé de consulter un médecin pour des tests complémentaires.


Quand utiliser ce test ?

Il est recommandé d'effectuer ce test avec les premières urines du matin car elles contiennent un taux maximal de l'hormone F.S.H. Effectuer le test à un autre moment de la journée pourrait conduire à un faux résultat négatif.

Comment effectuer le test ?

Précautions:

- **Lire les instructions avec attention avant d'effectuer le test.**
- Ne pas utiliser après la date de péremption inscrite sur l'emballage.
- Stocker dans un endroit sec, ne pas congeler.
- Eloigner le produit de la portée des enfants.
- Ouvrir l'emballage qu'au moment d'effectuer le test.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé.

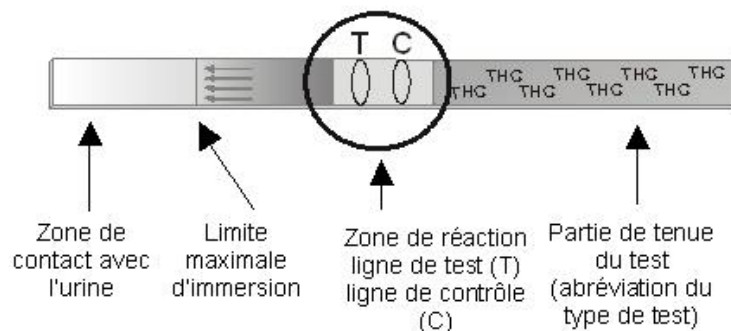

Quand réaliser les tests ?


Le premier test peut être réalisé à n'importe quel moment du mois, le second test doit être réalisé 1 semaine après le premier. Il est recommandé d'effectuer le test avec les premières urines du matin car elles contiennent le taux d'hormones maximal et procurent des résultats plus fiables.

Instructions

- Avant d'uriner, retirer la bandelette de test de son emballage individuel.
- Recueillir un échantillon d'urine dans un récipient stérile.
- Tenir la bandelette par la partie de tenue adapter et immerger la bandelette absorbante dans l'échantillon d'urine pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement humide. Attention à ne pas immerger le test au-delà de la limite maximale d'immersion symbolisée par les flèches sur la bandelette.
- Retirer le test de l'échantillon d'urine.
- Poser la bandelette sur une surface plane et propre, veiller à ce que la zone de réaction soit orientée vers le haut en attendant les résultats. Une coloration rose peut être observée dans la zone pendant que le test se révèle.
- Attendre cinq minutes (5) avant de lire les résultats.
- Une ligne de couleur rose/violet devrait apparaître dans partie supérieure de la zone de réaction. Il s'agit de la ligne de contrôle (C). Cela signifie que le test est terminé et qu'il fonctionne correctement. Si aucune ligne n'apparaît dans la partie supérieure de la zone de réaction, cela signifie que le test est invalide.

Résultats

Ne pas lire les résultats après 10 minutes.

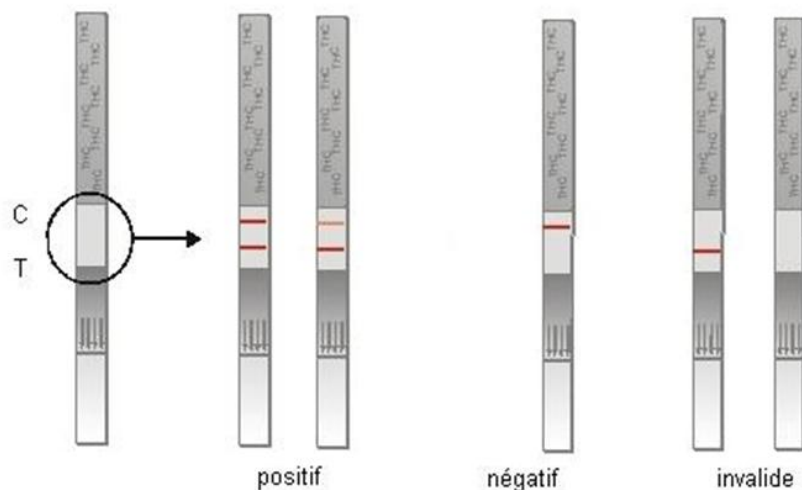

Positif : Si une ligne de couleur rose/violet apparaît à la fois dans la partie supérieure (ligne de contrôle C) et dans la partie inférieure de la zone de réaction (ligne de résultat T), le résultat est positif.

Négatif : Si seule une ligne apparaît dans la partie supérieure de la zone de réaction (ligne de contrôle C), le résultat est négatif.

Invalide : Si aucune ligne n'apparaît dans la zone de réaction ou si une ligne apparaît dans la partie inférieure de la zone de réaction (ligne de test T) mais pas dans la partie supérieure de la zone de réaction (ligne de contrôle C), alors le test est invalide et doit être répété avec un nouveau kit.

Que faire avec les résultats ?

Si le premier test est positif, refaire un test une semaine plus tard en utilisant la seconde bandelette afin de confirmer le résultat. Le taux de F.S.H. peut être élevé pendant de courtes périodes lors d'un cycle normal mais c'est un taux élevé pendant une période plus importante qui peut indiquer un état de pré-ménopause. **Si le second test est également positif, il est conseillé de consulter un spécialiste.**

Un résultat positif signifie que le taux de F.S.H. est élevé, cela peut être un indicateur d'un état de pré-ménopause et si les symptômes tels que cycles irréguliers, bouffées de chaleur, changements d'humeur, insomnie et fatigue existent, il est conseillé de consulter un spécialiste.

Un résultat négatif indique que le taux de F.S.H. est normal. Cependant, en cas de cycles irréguliers ou de symptômes de pré-ménopause, il est recommandé de consulter un médecin.